



4 décembre 2002

Alerte relative à des lève-patients de marque SAMERY ayant pour noms commerciaux SAMLIFT, SAMLIGHT, SAMSOFT de la société DUPONT MEDICAL.

Alerte n° : DM 02/C07

Des **incidents graves** sont survenus sur des lève-patients de marque SAMERY, mis sur le marché entre 1990 et 1997.

La société DUPONT MEDICAL, repreneur de la marque SAMERY, rappelle aux établissements utilisateurs ou loueurs de ces dispositifs qu'une maintenance annuelle est nécessaire pour ces appareils et préconise le changement de l'axe de suspension tous les 3 ans.

Il est impératif de mettre hors service les appareils qui n'ont pas été mis en conformité.

Pour les appareils ne disposant pas d'un système de pesée, si vous disposez d'un service technique compétent, vous pouvez effectuer la maintenance en suivant les instructions du manuel d'utilisation, ou contacter la société DUPONT MEDICAL, au 03.83.49.54.95 poste 472, qui pourra vous donner toutes les informations nécessaires et vous proposer d'intervenir dans le cadre d'un contrat de maintenance.

Par contre, le remplacement de l'axe de suspension des appareils équipés d'un système de pesée ne peut se faire que par des techniciens de DUPONT MEDICAL.

[Télécopie d'alerte.](#)

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.
